

COUSSIN RAFRAÎCHISSANT avec aimants intégrés

Le coussin rafraîchissant combine l'effet curatif de la thérapie par le froid avec des aimants Néodyme puissants. Le coussin à 8 chambres de gel peut être utilisé de manière très flexible, où vous le souhaitez : en dessous de la tête, la nuque, le dos, le ventre, les jambes ou les pieds. Idéal à la maison ou sur la route !

+ Favorise un sommeil réparateur

+ Rafraîchit la tête, les jambes et les pieds

+ Réduit les gonflements



Les aimants devraient être dirigés vers le bas



La tête

Un bon sommeil est extrêmement important pour être en forme. Un bon sommeil = une meilleure journée ! Ceux qui dorment bien sont généralement moins susceptibles à tomber malade. Pendant notre sommeil, notre équilibre hormonal et notre métabolisme se normalisent et nos muscles se détendent. Il est compréhensible que les troubles du sommeil puissent causer des céphalées de tension et des migraines.



Le cou et la nuque

Les principales causes de douleurs cervicales sont les suivantes : Problèmes de posture et muscles sursollicités au niveau du dos, de la nuque et des épaules. Rester longtemps dans une mauvaise posture, un courant d'air froid, une mauvaise position de sommeil – les douleurs au niveau de la nuque se ressentent souvent au plus tard le jour suivant.



Le ventre

Ce sont les plaintes les plus fréquentes. Elles sont généralement causées par les organes digestifs et sont souvent inoffensives. Cependant, les causes ne sont pas toujours claires. L'anxiété et le stress peuvent également entraîner des douleurs abdominales.



Les jambes et les pieds

Rester debout ou assis pendant toute la journée, c'est le quotidien de nombreuses personnes. Le soir, les jambes sont souvent lourdes et les pieds enflés, surtout pendant la saison chaude.



Description du produit :

Le coussin rafraîchissant MAGNETIX au format 49 x 25 cm soulage en cas de douleurs, contusions, fièvre et tensions dues au stress. Le coussin rafraîchissant convient à une application froide ou chaude (bain-marie).

- avec housse en coton doux pour la peau
- avec 8 aimants Néodyme puissants (1 200 Gauss)

La housse en coton fournie protège votre peau du froid ou de la chaleur. Elle est douce et souple. Grâce aux perles de gel flexibles à l'intérieur des chambres à gel, le coussin s'adapte parfaitement aux formes du corps.

Mode d'emploi :
Information pour l'utilisateur.

DORMEZ BIEN !


Coussin rafraîchissant



Matériaux : PVC, gel bleu
Taille : 49 x 25 cm
Housse : 100 % coton
Avec 8 aimants Néodyme (1200 Gauss)

Application et mode d'emploi :

Le coussin rafraîchissant MAGNETIX est utilisé pour la thérapie par le froid et aussi pour la thérapie par le chaud (thermothérapie). Le coussin est flexible à l'emploi et facile à utiliser.

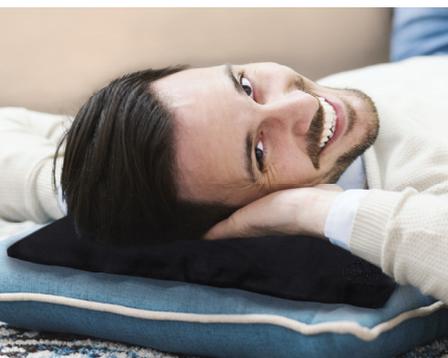

Indications pour la thérapie par le froid *

- migraines et maux de tête
- tensions
- gonflements après des interventions esthétiques
- contusions
- maux de dents
- éruptions cutanées et démangeaisons
- inflammations
- troubles liés à la chaleur
- coups de soleil
- fièvre
- pour un sommeil dans un espace plus frais

Mode d'emploi pour la thérapie par le froid :



1 h

Avant l'utilisation, mettre le coussin en gel environ 1 heure au réfrigérateur ou au congélateur. Avant l'utilisation, ajouter la housse. A utiliser uniquement avec housse. Après l'utilisation, le coussin peut être gardé au congélateur. Enlevez d'abord la housse et rangez-la à portée de main.

Indications pour la thérapie par le chaud *

- tensions
- maux de tête persistants
- douleur de la nuque
- mal au dos
- mal à la gorge
- articulations douloureuses
- maux de ventre
- frissons
- courbatures
- pour la préparation avant le sport
- favorise la circulation sanguine locale

Mode d'emploi pour la thérapie par le chaud :



6 min

Mettre le coussin en gel sans housse env. 6 minutes au bain-marie (jusqu'à 50° C).
Attention : Une surchauffe peut détruire les coussins en gel.
Ne convient pas aux fours micro-ondes !

* Ces conseils ne se substituent en aucun cas à un traitement médical et ne présentent aucunement un diagnostic.



Aussi disponible :
Bandeau rafraîchissant
Compresse genou rafraîchissante

Votre conseiller MAGNETIX Wellness :

⚠ Avertissements : ne pas utiliser chez les enfants de moins de 3 ans. Consultez votre médecin traitant avant l'utilisation en cas de problèmes circulatoires artériels, l'hypersensibilité au froid, l'hypersensibilité cardiaque aiguë ou maladies circulatoires. Avant d'appliquer le bandeau sur la peau, mettez-le dans la housse fournie. Le gel est facilement biodégradable et non toxique. Conservez la compresse hors de la portée des enfants.

Si un enfant ou un adulte a avalé le contenu de la compresse, il est recommandé de consulter un médecin sans attendre. Les compresses endommagées ne doivent plus être utilisées. Les compresses ne doivent jamais être en contact direct avec du métal chaud (Par ex. un fond de casserole). Ne convient pas pour les fours à micro-ondes ! Les compresses peuvent être jetées avec les déchets ménagers.
Attention : pour usage externe uniquement !