

# KÜHLENDES STIRNBAND

mit integrierten Magneten

Das Kühlende Stirnband kombiniert die heilende Wirkung von Kältetherapie mit kraftvollen Neodym-Magneten. Das mit 2 anpassungsfähigen Gelkissen bestückte Stirnband ist handlich, kompakt und flexibel einsetzbar, ganz wo Sie es wünschen – an Stirn, Ohren, Hals oder Nacken. Perfekt für Zuhause und unterwegs!



Die Magnete sollten zur Haut zeigen



+ Lindert Schmerzen

+ Entspannt den Kopf

+ Kühlt Schläfen & Stirn



## Kopf

Wer kennt sie nicht – Kopfschmerzen sind fast jedem bekannt. 200 verschiedene Formen soll es laut Fachkreisen geben. Migräne und Spannungskopfschmerz zählen zu den häufigsten Formen. Stress, Flüssigkeitsmangel, Wetterfühligkeit, Erkältung oder einfach nur die falsche Brille – die Palette der Ursachen ist breit gefächert.



## Nacken und Schulter

Als Hauptursachen für Nackenschmerzen gelten Haltungsprobleme und überlastete Muskeln im Rücken-, Nacken- und Schulterbereich. Langes Verharren in einer Fehlhaltung, ein kalter Luftzug, eine falsche Schlafposition – häufig melden sich spätestens am nächsten Tag quälende Schmerzen im Nackenbereich.



## Ohr

Das Ohr ist ein sehr sensibles Sinnesorgan, in dem sich viele Nervenenden befinden. Schon kleine Störungen können deshalb Ohrendruck oder Ohrenscherzen auslösen. Oft ist eine Entzündung oder Infektionen der Grund für Ohrenscherzen.



## Kiefer

Schmerzen im gesamten Kopfbereich und im Gesicht können sich bis in die Zähne fortsetzen. Manchmal genügt eine einfache Erkältung, um Unbehagen in den Zähnen auszulösen. Auch eine Fehlstellung von Kiefer oder Zähnen kann Schmerzen verursachen.

## Produktbeschreibung:

Das MAGNETIX Kühlendes Stirnband im Format 69 x 5,5 cm bietet wohlthuende Hilfe bei Schmerzen, Schwellungen und kleinen Wunden. Das Kühlende Stirnband ist sowohl für die Kälteanwendung als auch für die Warmanwendung (Wasserbad) sehr gut geeignet.

- mit hautfreundlichem Baumwollbezug
- mit 6 kraftvollen Neodym-Magneten (1.200 Gauss)

Der beigegefügte Baumwollbezug schützt Ihre Haut vor der Kälte bzw. Wärme und ist dabei weich und geschmeidig. Durch den praktischen Klettverschluss am Bezug können Sie das Stirnband einfach und bequem anbringen.

Gebrauchsinformation:  
Information für den Anwender.

# BLEIB COOL!

## Kühlendes Stirnband



Material: PVC, blaues Gel  
Maße: 69 × 5,5 cm  
Bezug: 100 % Baumwolle  
Mit 6 Neodym-Magneten (1.200 Gauss)



### Anwendung und Gebrauch:

Das MAGNETIX Kühlendes Stirnband wird für die Kältetherapie angewandt, eignet sich jedoch auch sehr gut für die Wärmetherapie. Das Stirnband ist individuell größenverstellbar und unkompliziert in der Anwendung.



#### Indikation zur Kältetherapie\*

- Migräne und Kopfschmerzen
- Verspannungen
- Schwellungen nach kosmetischen Eingriffen
- Prellungen
- Tränensäcke und geschwollene Augen
- Augenringe
- Zahnschmerzen
- Ausschlag und Juckreiz
- Entzündungen
- Hitzebeschwerden
- Sonnenbrand
- Fieber

#### Anwendungshinweise für die Kältetherapie:



1 h

Das Stirnband vor der Anwendung etwa 1 Stunde lang im Kühl- oder Gefrierfach kühlen. Nach Gebrauch kann das Stirnband im Gefrierfach aufbewahrt werden. Den Bezug vorher abziehen und griffbereit verstauen.

#### Indikation zur Wärmetherapie\*

- Verspannungen
- anhaltendem Kopfschmerz
- Nackenschmerzen
- Halsschmerzen
- Verkühlungen
- Muskelkater
- Zur Vorbereitung vor dem Sport
- Fördert die lokale Durchblutung

#### Anwendungshinweise für die Wärmetherapie:



6 min

Das Stirnband ohne den Bezug ca. 6 Minuten lang in ein Wasserbad legen (bis 50° C).  
**Achtung:** Überhitzung kann die Gelkissen zerstören.  
**Nicht für die Mikrowelle geeignet!**

\* Diese Empfehlungen sind kein Ersatz für eine medizinische Behandlung.



Auch erhältlich:  
Kühlendes Kissen  
Kühlende Kniekomresse

Ihr MAGNETIX Wellness Berater:

**Warnhinweise:** Nicht anwenden bei Kindern unter 3 Jahren. Anwendung bei arteriellen Durchblutungsbeschwerden, Kälteüberempfindlichkeit, akuten Herz- & Kreislauferkrankungen nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt. Das Stirnband vor dem Auflegen auf der Haut in den beigegefügtten Bezug legen. Das Gel ist biologisch leicht abbaubar und ungiftig. Kinder keinesfalls mit einem Gelkissen alleine lassen. Hat ein Kind oder

auch Erwachsener den Gelinhalt geschluckt, sollte dringend ein Arzt aufgesucht werden. Beschädigte Gelkissen sollten nicht mehr verwendet werden. Die Gelkissen dürfen niemals mit heißem Metall (z. B. Topfboden) in Kontakt kommen. Nicht für die Mikrowelle geeignet! Die Gelkissen können über den Hausmüll entsorgt werden.  
**Achtung: Nur zur äußeren Anwendung!**